



LUMBO SACRALIS®



STABILISIERUNGSSTUFE ★ ★ ★ ☆ ☆

**AM-SO-03**

Rückenbandage mit Pelotte zur Verstärkung und Entlastung der lumbosakralen Wirbelsäule aus einem atmungsaktivem Gestrück. Durch die Pelotte werden die Muskeln im Lendenbereich stimuliert und gestärkt. Zur Komfortverbesserung gibt es einen Taillengut mit vorderem Klettverschluss.

Durch das hautfreundliche Gewebe ist die Bandage sehr komfortabel zu tragen.

## Anwendungsbereiche

---

- Akute Schmerzsyndrome der Lendenwirbelsäule
- Degenerative / Muskuläre Insuffizienz der Lendenwirbelsäule/ Kreuzbein
- Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule
- Nach Lendenwirbelsäulenoperation
- Nach dem Entfernen der Ruhigstellung als Stabilisator im lumbosakralen Bereich
- Verformungen im Bereich der Lendenwirbelsäule
- Überbeanspruchung / Überlastung im LWS-Bereich

## Kontraindikationen

---

Die Bandage sollte in folgenden Fällen nicht verwendet werden:

- Frische Wunden
- Hautabschürfungen
- Hautekzeme oder Hautallergien
- Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren
- Hypertonie Grad III (starker Bluthochdruck)
- **Nicht anwenden bei Frakturen (Brüchen) oder Luxationen (Ausrenkungen), die eine stabilere Anwendung erfordern.**

# Anlegen der Bandage

---



## Patienteninformationen

---

- Tragen Sie nach Möglichkeit ein Baumwollhemd unter der Bandage.
- Verwenden Sie die Bandage streng nach den Angaben Ihres Arztes und unter ärztlicher Aufsicht.
- Die Rückenbandage sollte zunächst durch einen Arzt oder durch geschultes medizinisches Personal angelegt werden.
- Verwenden Sie die Bandage nicht nach der Anwendung einer orthopädische Salbe oder eines wärmenden Gels.
- Bei Verwendung einer zu kleinen Größe, oder bei einer zu engen Schnürung kann es zur vorübergehenden Beeinträchtigung des Darms und/oder der inneren Organe oder zu einer Beeinträchtigung der Kreislaufs- und der Atemwege kommen.
- Mangelnde tägliche Körperpflege oder unzureichende Reinigung der Bandage kann zu allergischen Reaktionen und Jukreiz mit vermehrtem Schwitzen führen.

## Produktpflege

---

- Handwäsche in warmem Seifenwasser bei 30 Grad.
- Nicht bügeln und nicht chlören.
- Nicht auf speziellen Wärmequellen trocknen (z.B. auf der Heizung).



# Hersteller

---

REH4MAT SLAWOMIR  
WRONSKI  
36-060 GLOGOW MLP.  
Ul. PIASKI 47

Korrespondenzadresse  
ul. Truskawkowa 17, Widna  
Góra,  
37-500 Jarosław, POLEN  
Tel.: +48 (016) 621 4220  
E-Mail: [biuro@reh4mat.com](mailto:biuro@reh4mat.com)  
[www.reh4mat.com](http://www.reh4mat.com)



Herstellerregistrierung PL / CA 01 05556;  
DE/0000010937;  
Registrierung: DE / CA 37/882/55.2

Medizinprodukt Klasse I - kompatibel mit der Richtlinie des Rates (93/42/EWG) über Medizinprodukte. Der Hersteller von medizinischen Geräten und orthopädischen Unternehmen REH4MAT Slawomir Wronski hat die entsprechende Konformitätserklärung.