



AM-WSP-07

Hohe Rückenbandage (32 cm) mit orthopädischen Stäben zur Verstärkung und Entlastung der thorakalen und lumbosakralen Wirbelsäule aus einem atmungsaktivem Gestrück. Die zwei sich kreuzenden Bänder im Rücken erzeugen eine besondere Stabilität. Zur Komfortverbesserung gibt es einen Taillengut mit vorderem Klettverschluss. Durch das hautfreundliche Gewebe ist die Bandage sehr komfortabel zu tragen.

Anlegen der Bandage



Anwendungsbereiche

- Akute und heftige Schmerzsyndrome an der Grenze der Brustwirbelsäule zur Lendenwirbelsäule (u. a. Hexenschuss)
- Degenerative / Muskuläre Insuffizienz der Lendenwirbelsäule/ Kreuzbein
- Nach Lendenwirbelsäulenoperation
- Nach dem Entfernen der Ruhigstellung als Stabilisator im lumbosakralen Bereich
- Lumbale Spondylolisthesis (Wirbelgleiten) und / oder Überlastung im LWS-Bereich
- Degeneration der Wirbelsäule im thorakalen und lumbosakralen Bereich
- Verformungen im Bereich der Lendenwirbelsäule

Kontraindikationen

Die Bandage sollte in folgenden Fällen nicht verwendet werden:

- Frische Wunden
- Hautabschürfungen
- Hautekzeme oder Hautallergien
- Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren
- Hypertonie Grad III (starker Bluthochdruck)
- **Nicht anwenden bei Frakturen (Brüchen) oder Luxationen (Ausrenkungen), die eine stabilere Anwendung erfordern.**



Patienteninformationen

- Verwenden Sie die Bandage streng nach den Angaben Ihres Arztes und unter ärztlicher Aufsicht.
- Die Rückenbandage sollte zunächst durch einen Arzt oder durch geschultes medizinisches Personal angelegt werden.
- Tragen Sie nach Möglichkeit ein Baumwollhemd unter der Bandage.
- Verwenden Sie die Bandage nicht nach der Anwendung einer orthopädische Salbe oder eines wärmenden Gels.
- Bei Verwendung einer zu kleinen Größe, oder bei einer zu engen Schnürung kann es zur vorübergehenden Beeinträchtigung des Darms und/oder der inneren Organe oder zu einer Beeinträchtigung der Kreislaufs- und der Atemwege kommen.
- Mangelnde täglichen Körperpflege oder unzureichende Reinigung der Bandage kann zu allergischen Reaktionen und Juckreiz mit vermehrtem Schwitzen führen.

Produktpflege

- Handwäsche in warmem Seifenwasser bei 30 Grad.
- Nicht bügeln und nicht chlören.
- Nicht auf speziellen Wärmequellen trocknen (z.B. auf der Heizung).



Material

60% Polyester, 20% Nylon, 20% Latex

Hersteller

REH4MAT SLAWOMIR WRONSKI

36-060 GLOGOW MLP.

Ul. PIASKI 47

Tel.: 017851 62 23

E-Mail: biuro@reh4mat.com

www.ortezy.pl

CE Medizinprodukt Klasse I - kompatibel mit der Richtlinie des Rates (93/42/EWG) über Medizinprodukte. Der Hersteller von medizinischen Geräten und orthopädischen Unternehmen REH4MAT Slawomir Wronski hat die entsprechende Konformitätserklärung.