


REH4MAT

BRACES & SUPPORTS

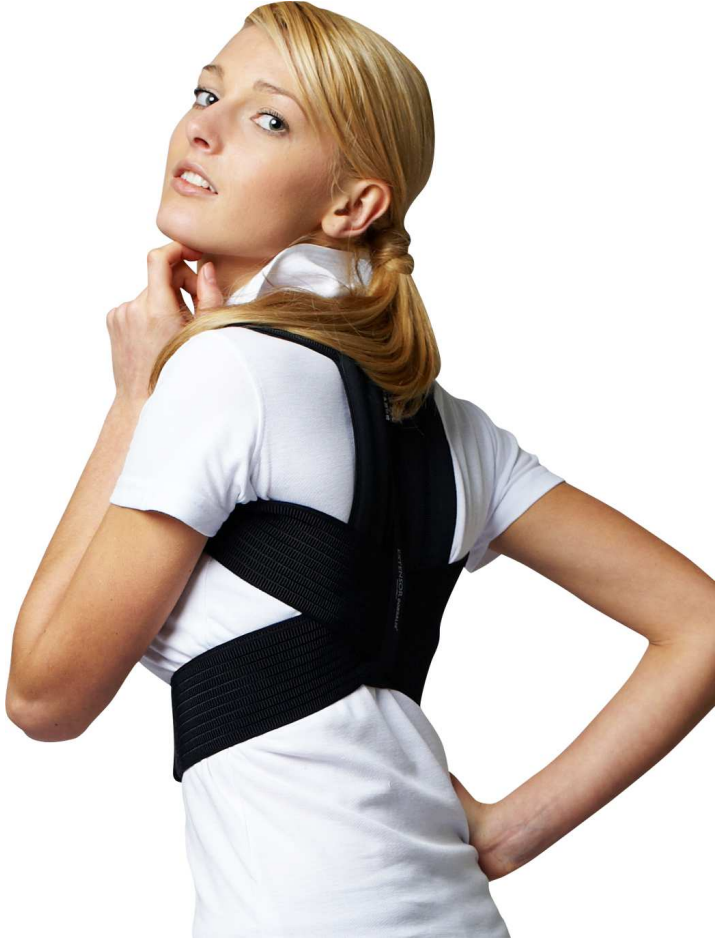

AM-PES-01

Der Geradehalter wird aus einem elastischen Gewebe gefertigt und enthält zwei orthopädische Stäbe zur Stabilisation im Schulterbereich. Die elastischen Bänder werden über die Schulter geführt, kreuzen sich im Rücken und werden dann im Bauchbereich geschlossen. Diese Konstruktion gewährleistet eine ideale Korrektur der Haltungsfehler bei Erwachsenen und Kindern. Durch die Bandführung passt sich die Bandage perfekt am Körper an.

Anlegen der Bandage




Anwendungsbereiche

- Schlüsselbeinverletzungen, die keinen chirurgischen oder orthopädischen Eingriff erfordern.
- Schmerzsyndrome im Bereich der Brustwirbelsäule.
- Verstärkter Rundrücken im Bereich der Brustwirbelsäule.

Kontraindikationen

Die Bandage sollte in folgenden Fällen nicht verwendet werden:

- Frische Wunden
- Hautabschürfungen
- Hautekzeme oder Hautallergien
- Sofern spezielle Behandlungen notwendig sind.

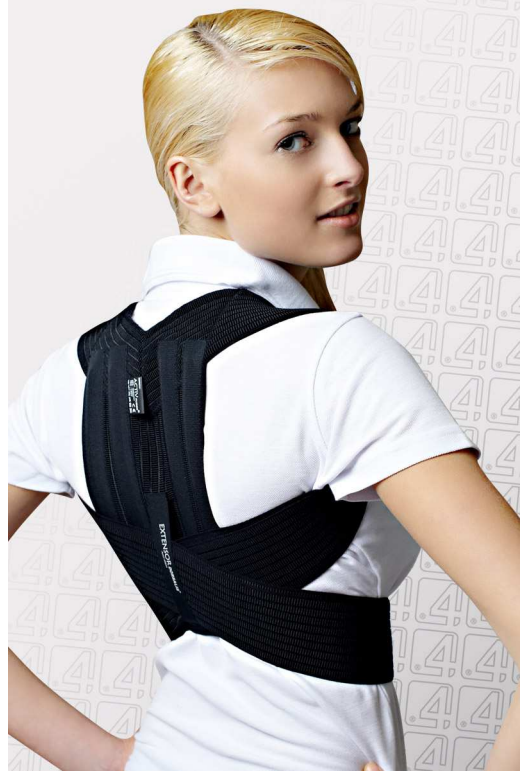

Patienteninformationen

- Verwenden Sie die Bandage streng nach den Angaben Ihres Arztes und unter ärztlicher Aufsicht.
- Die Rückenbandage sollte zunächst durch einen Arzt oder durch geschultes medizinisches Personal angelegt werden.
- Tragen Sie nach Möglichkeit ein Baumwollhemd unter der Bandage.
- Bei Verwendung einer zu kleinen Größe, oder bei einer zu engen Schnürung kann es zur vorübergehenden Beeinträchtigung des Darms und/oder der inneren Organe oder zu einer Beeinträchtigung der Kreislaufs- und der Atemwege kommen.
- Mangelnde täglichen Körperpflege oder unzureichende Reinigung der Bandage kann zu allergischen Reaktionen und Juckreiz mit vermehrtem Schwitzen führen.

Produktpflege

- Handwäsche in warmem Seifenwasser bei 30 Grad.
- Nicht bügeln und nicht chloren.
- Nicht auf speziellen Wärmequellen trocknen (z.B. auf der Heizung).



Material

60% Polyester, 20% Nylon, 20% Latex

Hersteller

REH4MAT Slawomir Wronski
36-060 Glogow Mlp.
ul. Piaski 47, POLEN

Korrespondenz:
ul. Truskawkowa 17, Widna Góra,
37-500 Jarosław, POLEN
Tel.: +48 16 621 41 35
Fax: +48 16 621 42 13
E-Mail: biuro@reh4mat.com
www.reh4mat.com

CE Herstellerregistrierung PL/CA 01 05556; DE/0000010937.
Registrierung DE/CA37/882/55.2
Medizinprodukt Klasse I - kompatibel mit der Richtlinie des Rates
(93/42/EWG) über Medizinprodukte. Der Hersteller von medizinischen
Geräten und orthopädischen Unternehmen REH4MAT Slawomir Wronski
hat die entsprechende Konformitätserklärung.