

REH4MAT

BRACES & SUPPORTS



AM-PES-02

Geradehalter zur Aufrichtung des Oberkörpers. Mittels spezieller starrer Bänder werden die Schultern nach hinten gezogen und die Haltung positiv korrigiert. Durch die im Rücken angeordnete Pelotte ist der Geradehalter bequem zu tragen und die Bänder werden rutschsicher geführt, wodurch sich die gesamte Bandage perfekt am Körper anpasst.

Anlegen der Bandage



Anwendungsbereiche

- Schlüsselbeinverletzungen, die keinen chirurgischen oder orthopädischen Eingriff erfordern.
- Schmerzsyndrome im Bereich der Brustwirbelsäule.
- Verstärkter Rundrücken im Bereich der Brustwirbelsäule.

Kontraindikationen

Die Bandage sollte in folgenden Fällen nicht verwendet werden:

- Frische Wunden
- Hautabschürfungen
- Hautekzeme oder Hautallergien
- Sofern spezielle Behandlungen notwendig sind.

Patienteninformationen

- Tragen Sie nach Möglichkeit ein Baumwollhemd unter der Bandage.
- Verwenden Sie die Bandage streng nach den Angaben Ihres Arztes und unter ärztlicher Aufsicht.
- Die Bandage sollte zunächst durch einen Arzt oder durch geschultes medizinisches Personal angelegt werden.
- Bei Verwendung einer zu kleinen Größe, oder bei einer zu engen Schnürung kann es zur vorübergehenden Beeinträchtigung der inneren Organe oder zu einer Beeinträchtigung der Kreislaufs- und der Atemwege kommen.
- Mangelnde tägliche Körperpflege oder unzureichende Reinigung der Bandage kann zu allergischen Reaktionen und Juckreiz mit vermehrtem Schwitzen führen.

Produktpflege

- Handwäsche in warmem Seifenwasser bei 30 Grad.
- Nicht bügeln und nicht chloren.
- Nicht auf speziellen Wärmequellen trocknen (z.B. auf der Heizung).
- Vor dem Waschen die Pelotte entfernen.



Material

Polyurethanschaum, Polyurethanplatte, Velours, Klettverschlüsse

Hersteller

REH4MAT Slawomir Wronski
36-060 Glogow Mlp.
ul. Piaski 47
POLEN
Tel.: +48 16 621 41 35
E-Mail: biuro@reh4mat.com
www.reh4mat.com

CE Medizinprodukt Klasse I - kompatibel mit der Richtlinie des Rates (93/42/EWG) über Medizinprodukte. Der Hersteller von medizinischen Geräten und orthopädischen Unternehmen REH4MAT Slawomir Wronski hat die entsprechende Konformitätserklärung.