

Jewett-Korsett AM-GJ-01



Korsett nach Jewett-Bauart aus einem verstellbaren Aluminiumrahmen mit Baumwoll-Fütterung zur Vermeidung von Hautirritationen. Über ein Schraubsystem kann einfach die Höhe und die Breite des Korsetts angepasst werden.

Anlegen / Anpassung der Orthese



Anwendungsbereiche

Das Korsett ist für die Stabilisierung der Sagittalebene (seitlicher Blick auf die Wirbelsäule) entworfen, das vor allem den Wirbelbereich L-3 bis Th-10 stabilisiert.

- Kompressionsfrakturen,
- Morbus Bechterew
- Morbus Scheuermann
- Schmerzsyndrome durch Fehlstellungen
- Ruhigstellung der Wirbelsäule
- Tuberkulose an der Wirbelsäule
- Wirbelsäulentumore

Kontraindikationen

Die Bandage sollte in folgenden Fällen nicht verwendet werden:

- Seitliche Wirbelsäulenkrümmungen (Skoliose)
- Instabile Brüche oder Verwerfungen, die eine besondere Behandlung benötigen.
- Bei einem hohen Maß an Wirbeldeformationen.
- Bei einem hohen Maß an Wirbelentzündungen und -verformungen.
- Notwendiger kompletter Immobilisierung (Ruhigstellung) der Wirbelsäule

Patienteninformationen

- Verwenden Sie die Bandage streng nach den Angaben Ihres Arztes und unter ärztlicher Aufsicht.
- Die Rückenbandage sollte zunächst durch einen Arzt oder durch geschultes medizinisches Personal angelegt werden.
- Die Orthese kann nur bei richtiger Auswahl und Montage die vorgesehenen Funktionen erfüllen.
- Tragen Sie nach Möglichkeit ein Baumwollhemd unter der Bandage zur Vermeidung von Hautabschürfungen und Scheuerstellen.
- Überprüfen Sie häufiger die vom Korsett betroffenen Hautstellen.
- Die langfristige Nutzung des Korsetts kann zu Muskelschwund führen (je länger das Korsett täglich getragen wird, umso größer die Wahrscheinlichkeit). Es werden krankengymnastische Übungen zum Aufbau der Muskulatur empfohlen. Stimmen Sie die Übungen mit Ihrer Krankengymnastik ab.
- Mangelnde täglichen Körperpflege oder unzureichende Reinigung der Bandage kann zu allergischen Reaktionen und Juckreiz mit vermehrtem Schwitzen führen.
- Die Haut sollte an der von dem Korsett berührten Stelle sauber und nicht mit Cremes, Salben oder Umschlägen behandelt sein.

Wichtiger Hinweis:

Die korrekte Funktion / Wirkungsweise der Orthese kann nur bei einem Kauf oder einer Anpassung durch einen qualifizierten Mitarbeiter von Reh4Mat oder ein medizinisches Fachgeschäft sichergestellt werden.


Produktpflege

- Handwäsche in warmem Seifenwasser bei 30 Grad.
- Nicht bügeln und nicht chloren.
- Nicht auf speziellen Wärmequellen trocknen (z.B. auf der Heizung).



Hersteller

REH4MAT SLAWOMIR WRONSKI
 36-060 GLOGOW MLP.
 Ul. PIASKI 47
 Tel.: +48 16 621 42 20
 E-Mail: biuro@reh4mat.com
www.reh4mat.com

 Medizinprodukt Klasse I - kompatibel mit der Richtlinie des Rates (93/42/EWG) über Medizinprodukte. Der Hersteller von medizinischen Geräten und orthopädischen Unternehmen REH4MAT Slawomir Wronski besitzt die entsprechende Konformitätserklärung. Registrierungsnummer des Herstellers in der Meldestelle für Medizin, Medizinprodukte und Biozide in Warschau: PL/CA01 05556.